



BMC Medical Co., Ltd.

JAP

Room 110, Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-22-8293 9881 Fax: +86-22-8293 9881 ext. 810 intl@bmc-medical.com <https://en.bmc-medical.com/>

仕様は予告なく変更される場合があります。

V1.5 SC-A-202406001

BMC Mini オートCPAPシステム

M1 Mini




そよ風のように、自由な旅を



多彩な旅のシーン を想像して

BMC M1 Miniは、いびきおよび閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸症候群 (OSAHS) の治療を目的として設計された、自動圧調整機能を備えたトラベル用CPAP装置です。小型・軽量のため、ほぼどこへでも持ち運べます。

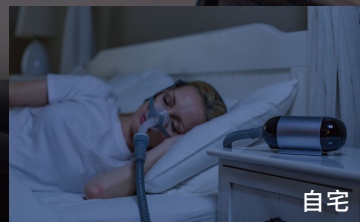

「Mini CPAP」を再定義する、 モダン&ミニマルデザイン



カラフルなライトストリップリング

デバイスのカラー点滅により、リアルタイムのフィードバックを体感いただけます。

滑り止め設計

本体底面の4つのラバー製滑り止め脚により、治療中の本体のずれ(動き)を効果的に抑えます。

本体サイズ


外形寸法:159 mm × 66 mm × 72 mm (6.26 in × 2.60 in × 2.83 in)

重量:400 g未満



圧力調整感度

感度はStandard／Soft／Female
の3段階で調整でき、
個別化した治療に対応します。

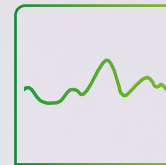

Smart A/C機能

インテリジェントな圧力調整技術により、M1 Miniは、ユーザーのライフスタイルの
変化に合わせて治療圧パラメータを自動で変更できます。
毎晩、最適な治療を提供します。



オートランプ機能

M1 Miniのオートランプ機能では、呼吸
パターンに基づいてランプ時間が自動
調整されます。これにより、毎晩、快適
でパーソナライズされた睡眠体験を実
現します。



アクセサリ交換リマインダー

エアフィルター、HME、マスク、呼吸チューブなどのアク
セサリーについて交換リマインダーを設定でき、
最適な性能を維持できます。



メンテナンスリマインダー

180日または360日のメンテナンスリマ
インダーを設定でき、M1 Miniを最適な
状態に保てます。





LightTrip — M1 Mini専用アプリ

M1 Miniは専用アプリLightTripで操作できるため、ミニマルで洗練されたデザインを実現しながら、操作性を手元に集約できます。Bluetooth®無線技術により、M1 Miniをスマートデバイスとペアリングできます。アプリでできること：



M1 Miniの起動／停止



M1 Miniの設定および患者プロフィールの設定



治療状況の確認およびレポートの作成




ファームウェア更新

製品アクセサリ



エアフィルター

- 空気中のほこり、花粉、その他のアレルゲンを効果的にろ過します。
- フィルターは定期的に清掃し、交換してください。

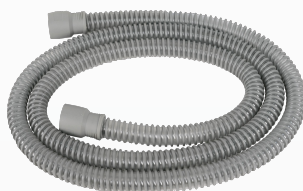

エアチューブ

- 15mm／22mmを選択可能



持ち運び用ケース

- 合理的な内部スペース設計
- 持ち運びに便利
- M1 Miniを効果的に保護



収納バッグ

- 柔らかな素材
- 仕切り付きデザイン
- 携帯性と利便性

販売名	医療機器認証番号	一般名称	クラス分類
オートCPAPシステム M1 Mini	307ALBZX00023000	持続的自動気道陽圧ユニット	高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー
本 社 住 所: 〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL: 03-5422-9767
URL: <http://life-tech.co.jp>

■ お問い合わせは...

仕様

適用範囲	いびきおよび閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸症候群（OSAHS）の治療に適しています。
本体サイズ	外形寸法: 159 mm × 66 mm × 72 mm（6.26 in × 2.60 in × 2.83 in） 重量: 400 g未満
動作モード	CPAP, AutoCPAP
圧力範囲	4 - 20 hPa
圧力精度	± 0.5 hPa
圧力感度	スタンダード / ソフト / レディース
Smart A/C	はい
ランプ時間	0 - 60 min / Auto
Reslex（呼気圧リリーフ）	オフ / レベル1〜3
自動オン	はい
自動オフ	はい
熱・湿気交換器（HME）タイプ	なし / HU（標準） / HU-Plus（強化）
リーク（漏れ）アラート	はい
アクセサリ交換リマインダー	はい
自動リーク補正	はい
アプリでファームウェア更新	はい
無線データ伝送	はい
音圧レベル	圧力10 hPaで動作時: 30 dB未満
AC電源仕様	100〜240 V AC、50 / 60 Hz、最大1.0 A
本体入力	19 V、1.26 A
持ち運び用ケース	オプション

